



## ELASTIK TRÆNER



Ringen til elastikkerne  
sidder i slidsen på  
redskabet

Sidehåndtagene er i

bund Ringen er låst




Ringen til elastikkerne  
sidder låst fast i  
redskabet

Ringen er ikke fast,  
men kan dreje

Sidehåndtagene er i  
bund og ringen er låst



Sidehåndtagene løftes og ringen bliver fri

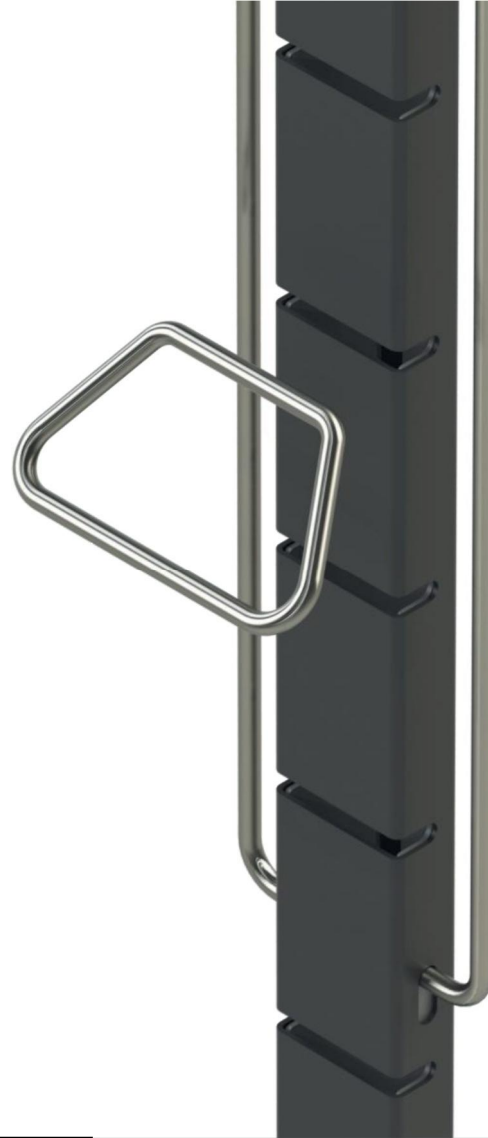

Ringen kan tages ud  
sidehåndtagene er  
stadig oppe



Ringen kan nu flyttes  
til en anden slids

Sidehåndtagene  
oppe, så slidsen er  
åben



Ringen skubbes ind i slidsen



Sidehåndtagene  
sænkes igen Ringen  
er låst



Mariendalsvej 22

8800 Viborg

Tel. +45 8661 3611

E-mail: [chiroform@chiroform.dk](mailto:chiroform@chiroform.dk)

[www.chiroform.dk](http://www.chiroform.dk)